

Table des matières

Consignes de sécurité importantes.....	14
Bienvenue	15
Contenu du paquet.....	16
Caractéristiques	16
Consignes de montage.....	17
Consignes d'utilisation	19
Entretien.....	20
Dépannage	22
Autres produits utiles	23
Garantie.....	24



Consignes de sécurité importantes

Votre fauteuil Risedale est conçu pour une utilisation domestique par un seul utilisateur pesant moins de 300 livres (136 kg). Toute autre utilisation annule la garantie.

Les consignes et les recommandations pour une utilisation sécuritaire et appropriée sont décrites dans ce manuel de l'utilisateur. Veuillez lire toutes les consignes avant d'utiliser votre fauteuil Risedale.

▲ **DANGER** – Pour réduire les risques de choc électrique :

Débranchez toujours votre fauteuil Risedale avant de le nettoyer.

▲ **AVERTISSEMENT** – Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de choc électrique ou de blessure corporelle :

1. Débranchez le fauteuil de la prise de courant avant d'ajouter ou de retirer des pièces (le cas échéant).
2. Débranchez toujours votre fauteuil Risedale avant de récupérer un objet qui est tombé sous le coussin ou avant de le nettoyer.
3. N'utilisez votre fauteuil Risedale que pour l'utilisation prévue, telle que décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par Uplift Technologies (le fabricant).
4. Comme pour tout appareil électrique, n'utilisez pas votre fauteuil Risedale dans l'eau ou près de l'eau. Ne faites jamais fonctionner votre fauteuil Risedale si le cordon ou la fiche d'alimentation électrique est endommagé, ou si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
5. N'utilisez pas le fauteuil à l'extérieur.
6. Gardez le cordon électrique loin des surfaces chauffées.
7. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
8. Ne tentez pas de réparer vous-même un problème électrique ou mécanique. Le fauteuil Risedale doit être réparé par un technicien qualifié uniquement. Communiquez avec le commerçant pour obtenir de l'aide.
9. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec votre fauteuil Risedale. Si le mécanisme d'élévation est levé et abaissé de façon continue, cela peut l'endommager.
10. Tenez les bras lorsque vous utilisez votre fauteuil Risedale.
11. Consultez un médecin si vous prenez des médicaments ou si vous êtes gêné par des limitations physiques qui peuvent nuire à votre capacité d'utiliser votre fauteuil Risedale de façon sécuritaire.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un fauteuil Risedale.

Votre fauteuil Risedale est le fruit de nombreuses années d'ingénierie, d'élaboration et d'essais. Notre objectif consistait à vous offrir le type de meuble que vous souhaitez, fonctionnant de façon à vous permettre de vous lever sans effort et sans douleur. Je pense que nous avons réussi avec le fauteuil Risedale. De plus, celui-ci fonctionne discrètement; personne n'a besoin de savoir que le fauteuil se soulève, et il est probable que personne ne le remarque.

Fabriqué à partir de bois dur robuste et capitonné à l'aide de tissu brocart durable, votre fauteuil Risedale est un meuble de qualité que vous pouvez être fier d'avoir à la maison. Sa conception de fauteuil à ailes sera toujours à la mode.

Votre fauteuil Risedale est protégé par notre garantie à vie et notre garantie de satisfaction. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur pour les directives concernant l'utilisation et le montage appropriés, et obtenir de plus amples renseignements sur la garantie et les mesures de précaution. Conservez ce manuel de l'utilisateur pour consultation ultérieure. Si vous respectez les consignes d'utilisation et d'entretien contenues dans ce manuel de l'utilisateur, votre fauteuil Risedale fonctionnera sans problème pendant de nombreuses années.

Veuillez envoyer votre bon de garantie dès aujourd'hui, et dites-nous ce que vous pensez de votre nouveau fauteuil Risedale. Si vous souhaitez me faire part de vos commentaires personnellement, veuillez m'appeler en composant le 1 902 422-0804, poste 101.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,



Michael Speraw

Président

Contenu du paquet

Votre fauteuil Risedale doit comprendre toutes les pièces énumérées ci-dessous :

Fauteuil

- Quatre pieds
(les extensions sont vissées sur les pieds)
- Deux leviers de poussée
- Deux vis à oreilles de 2x2po
- Huit vis à bois
- Une clé hexagonale pour serrer les vis
- Un manuel de l'utilisateur et un bon de garantie situé à l'arrière du manuel.

Veillez vérifier que toutes les pièces sont présentes dans le paquet. Communiquez avec votre marchand si une pièce est manquante ou endommagée. Envoyez votre bon de garantie dès aujourd'hui pour vous assurer que vous êtes inscrit.

Spécifications

Modèle: RD01

Homologation CSA et C/US.

110 VCA 60 Hz 0,5 A

Brevet américain no 6 702 383 et no 5 316 370.

Autres brevets internationaux en cours.

Dimensions du fauteuil

Hauteur :

39po/99cm ou 40,5po/103cm*

Largeur : 27po/69cm

Poids : 64lb/29kg

Peut supporter une personne de : 300 livres/136kg

Siège

Hauteur :

17po/43cm ou 18,5po/47cm*

Hauteur du siège (coussin monté) : 25,5po/62cm ou 27po/66cm*

Profondeur : 20po/51cm

Largeur : 19po/48cm

Dossier

Hauteur : 23,5 po/60 cm

Largeur : 20 po/51 cm

Pouf (vendu séparément)

Hauteur :

16,5po/42cm ou 18po/46cm*

Longueur x largeur :

25po/64cm x 19po/48cm

Poids : 22,5lb/10kg

*Avec les extensions des pieds

Consignes de montage

Choisissez une surface propre pour monter votre fauteuil Risedale.

Après avoir retiré la boîte, retournez le fauteuil. Conservez la boîte et tous les emballages au cas où vous devriez rapporter le fauteuil au marchand.



Vissez les pieds et serrez à l'aide de la clé hexagonale fournie. Nous vous conseillons d'utiliser les vis à bois fournies pour fixer les pieds plus solidement.



Nota : si un pied ne se visse pas à la main, ne le forcez pas. Dévissez le pied, vérifiez si des débris sont présents dans l'orifice fileté et nettoyez-le au besoin, puis réessayez.

Nota : le numéro de série est situé sur l'étiquette fixée sur le dessous du fauteuil. Il est conseillé de le noter immédiatement et de l'inscrire sur votre bon de garantie.



Pour les utilisateurs plus petits que 5 pieds 1 pouce, retirez les extensions de pied à l'aide de la clé hexagonale fournie.

Suite du montage



Remettez le fauteuil à l'endroit et déployez les ailes et le dos.



Nota : les oreilles en plastique doivent entrer dans la poche située dans l'aile.



Couchez le fauteuil sur le côté, appuyez sur l'aile, poussez-la à sa place et serrez la vis à oreilles. Répétez la même opération de l'autre côté.

Nota : utilisez uniquement la clé hexagonale fournie pour serrer les vis à oreilles. L'utilisation d'une clé hexagonale plus longue ou d'une clé à cliquet peut endommager le fauteuil.



Le levier de poussée peut être installé du côté gauche ou droit. Pour le fixer, enclenchez-le sur le doigt de métal. Pour le retirer, tirez simplement vers le haut.

Nota : le doigt de métal se trouve entre le coussin et le bras.

N'utilisez pas les deux leviers de poussée en même temps.

Consignes d'utilisation

Après avoir monté votre fauteuil Risedale, placez-le de façon à ce que personne ne trébuche sur le cordon électrique et branchez-le dans la prise de courant.



Ensuite, asseyez-vous dans le fauteuil Risedale. Si vos pieds ne sont pas à plat sur le plancher, vous devez retirer les extensions de pieds de 1,5 pouce (voir les consignes de montage à la page 5).

Ensuite, poussez et tenez le levier de poussée avec votre pouce pour vous lever quand vous êtes en position assise.

Tenez les bras du fauteuil.

Pour descendre en position assise, tirez et retenez le levier de poussée avec votre index. Encore une fois, tenez les bras de votre fauteuil Risedale.



Nota : le fauteuil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus longue que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique; par conséquent, il n'existe qu'une seule façon d'insérer la fiche dans la prise. Si la fiche ne s'insère pas

entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien compétent pour qu'il procède à l'installation d'une prise électrique appropriée.

Nota : le levier de poussée fonctionne du côté gauche et du côté droit. Lorsque que vous fixez à nouveau le levier, enclenchez-le fermement sur le doigt de métal.

Avertissement : n'installez pas les deux leviers en même temps.

Mise en garde : pour récupérer un objet qui est tombé sous le coussin, soulevez d'abord le coussin du siège, puis débranchez le cordon d'alimentation et passez la main par l'un ou l'autre des côtés pour récupérer l'objet.

Entretien

Mécanisme d'élévation

Le mécanisme d'élévation de votre fauteuil Risedale ne possède aucune pièce qui doit être entretenue par l'utilisateur et il ne nécessite aucun entretien de routine. Si le mécanisme d'élévation et l'actionneur sont utilisés de façon appropriée et avec soin, ils fonctionneront sans problème pendant de nombreuses années.

Communiquez avec le vendeur ou avec le personnel du magasin où vous avez acheté votre fauteuil Risedale si le mécanisme d'élévation ne fonctionne pas de façon appropriée.

Nota : le fauteuil Risedale est conçu pour un seul utilisateur pesant moins de 300 lb (136 kg). Toute autre utilisation annule la garantie.

Entretien du tissu

Le tissu de votre fauteuil Risedale est fait de 53 % d'acrylique et de 47 % de polyester.

Il est important de garder le revêtement de votre fauteuil Risedale propre afin d'éviter une usure prématurée et de lui donner une meilleure apparence. Pour empêcher que le fauteuil ne se salisse, nous vous recommandons de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté.

Nota : n'utilisez jamais de brosse à fibre dure ou métallique qui pourrait endommager le revêtement.

Le tissu doit être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage à base d'eau ou à l'aide de mousse et d'eau tiède **UNIQUEMENT**.

Le tissu est irrétrécissable et indémaillable, mais vous devez toujours **ESSAYER** un solvant non éprouvé sur une surface qui n'est pas visible – par simple mesure de précaution.

Nota : ne retirez pas le rembourrage du coussin pendant le nettoyage.

Pour obtenir de meilleurs résultats lors du nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser un service de nettoyage de meuble professionnel.

Nota : n'utilisez pas de solvants pour nettoyage à sec sur le revêtement de votre fauteuil Risedale.

Suite de l'entretien

L'exposition directe à la lumière solaire décolorera le tissu.
Pour éviter la décoloration, ne placez jamais votre fauteuil Risedale dans un endroit où il sera exposé directement aux rayons du soleil.

Enlever les taches

Il est important de vous occuper rapidement des taches et des marques, car elles sont difficiles à enlever si on les laisse « prendre ».

Suivez toujours les étapes suivantes dans l'ordre pour enlever les taches :

1. Enlevez le surplus de la tache
2. Utilisez un solvant soluble dans l'eau
3. Utilisez un détergent à base d'eau
4. Rincez avec de l'eau
5. Asséchez en tapotant ou asséchez à l'aide d'un ventilateur ou d'un séchoir à cheveux réglé en mode « froid »

Autres détails importantes :

Utilisez uniquement de l'eau froide ou tiède. Évitez l'eau chaude car celle-ci rend souvent les taches permanentes.

Règle pratique : ne mouillez jamais un tissu lorsque vous le nettoyez. Appliquez les solvants et les solutions de nettoyage avec parcimonie.

Commencez par les rebords de la tache en vous dirigeant vers le centre afin d'éviter d'agrandir celle-ci.

Il est préférable d'utiliser une technique de tamponnage plutôt qu'une technique de frottage pour enlever les taches. Évitez de frotter trop fort.

Un séchage rapide aide à empêcher la formation de ronds.

Nota : si les techniques susmentionnées ne fonctionnent pas, ou si la tache est plus grande que d'habitude, vous devez faire appel à un service de nettoyage professionnel de bonne réputation.

Dépannage

Que faire si mon fauteuil Risedale ne fonctionne pas du tout lorsque je pousse ou que je tire sur le levier de poussée?

Premièrement, assurez-vous que le levier est solidement installé jusqu'à la partie inférieure du doigt de métal.

Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché fermement dans une prise de courant murale appropriée.

Si les mesures susmentionnées ne fonctionnent pas, vérifiez le boîtier de disjoncteurs en dernier recours avant d'appeler le commerçant pour obtenir un service de réparation.

Où se trouve le numéro de série sur mon fauteuil Risedale?

Le numéro de série est clairement indiqué sur l'étiquette située sous votre fauteuil Risedale.

Autres produits utiles



Sièges actionnés à l'électricité

Ces coussins, que l'on peut hausser à volonté, vous aideront à vous lever d'un fauteuil ou d'un canapé dans lequel vous êtes assis très bas. Vous pouvez les arrêter à la hauteur qui vous convient. Ce type de coussin est idéal lorsque vous vous mettez à table pour vos repas.

www.PowerSeat.com



Coussins portables

Le courant électrique n'est pas nécessaire! Ces coussins portables ont la capacité de hausser 80 % de votre poids. Ils sont très commodes à emporter en voyage, où que vous alliez.

www.SeatAssist.com



Fauteuil hygiénique à hauteur réglable

Cette chaise percée à hauteur réglable vous permet d'avoir autonomie et intimité là où vous en avez le plus besoin. Elle peut être utilisée à votre chevet ou dans votre cabinet de toilette.

www.commodeAssist.com

Garantie

Uplift Technologies Inc., par l'entremise de son détaillant, de son distributeur ou de son entreprise de service autorisé(e), garantit le fauteuil Risedale à l'acheteur d'origine contre les défauts matériels ou les défauts de fabrication, tel qu'indiqué ci-dessous :

Garantie à vie limitée

Uplift Technologies Inc. offre une garantie à vie limitée concernant le cadre de la chaise et le mécanisme de soulèvement. Uplift vous garantit que ces derniers seront exempts de défauts dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux. La présente garantie s'applique tant et aussi longtemps que le fauteuil demeure en possession de l'acheteur d'origine. Cette garantie à vie limitée protège le mécanisme de soulèvement uniquement contre la fatigue du métal et les soudures défectueuses. Elle ne concerne pas le moteur, le vérin de soulèvement ou les composants électriques.

Uplift se réserve le droit de remplacer uniquement le mécanisme de soulèvement faisant l'objet d'une défectuosité et non pas la chaise en entier.

La garantie à vie limitée ne concerne pas les états découlant d'un usage abusif et d'entretien ou de soin inapproprié ou inadéquat.

Garantie limitée de deux ans

Pendant une période de deux (2) ans suivant la date d'achat, Uplift réparera ou remplacera toute pièce parmi les suivantes qui a été déclarée, suite à une vérification d'un représentant autorisé d'Uplift, comme comportant un défaut matériel ou un défaut de fabrication : le cadre en bois, le moteur, le vérin de soulèvement et les composants électriques.

Note : la présente garantie ne protège pas le tissu, la mousse ou les dommages issus de l'usure normale.